

Gebrauchsanweisung Rollator LR 53/56



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Rollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.


Die Modelle LR53 und LR56 unterscheiden sich lediglich in der Sitzhöhe. Ansonsten sind beide Modelle hinsichtlich Konstruktion und Ausstattung identisch.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Rollator auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Rollator unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Bremsen.
- Achten Sie auf festen Sitz der Rückenlehne.
- Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als die eigene Schrittgeschwindigkeit. Sturzgefahr!
- Der Rollator ist nur als Gehhilfe einer Person geeignet.
- Der Transport von Lasten oder Personen ist nicht erlaubt.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen beim Sitzen oder Beladung (Einkaufskorb) vergrößert werden.
- Beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Beschreibung des Rollators

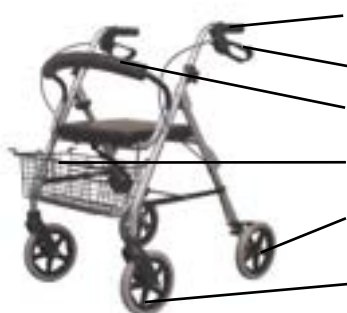

Handgriff

Bremse

Rückenlehne

Einkaufskorb

Laufräder

Lenkräder

Indikation

Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren.

Kontraindikation

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Handgriffe montieren und Höhenverstellung

Der Rollator wird weitestgehend vormontiert geliefert. Entnehmen Sie die Schrauben und Sternmutter vom Rahmen. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen. Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden.

Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit durch Einstecken der Schrauben und ziehen Sie die Sternmutter fest an. Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden.

Rückenlehne montieren

Die Rückenlehne sollten Sie nur montieren wenn der Rollator in sicherer Position steht und die Bremsen betätigt sind. Nehmen Sie die Rückenlehne und drücken Sie die Clipse rechts und links jeweils mit dem Zeigefinger hinein. Schieben Sie die Rückenlehne in die Führung. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht verkanten. Zum entfernen der Rückenlehne gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, hängen Sie diesen mit den vorhandenen Haken an den Rahmen ein. Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten. Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kipprisiko erhöht.



Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremse kann individuell eingestellt werden. Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremse härter) oder hinein (Bremse weicher). Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren.



Feststellbremsen

Bremsen aus der Bewegung

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten

Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt
Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus



Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff
Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben



Aufstellen

Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie die Bremsen durch leichten Druck auf die Handgriffe
entfaltet sich der Rollator
Drücken Sie die Querstrebe nach unten und klappen Sie den Sitz nach unten
Nun können Sie den Einkaufskorb wie beschrieben einhängen



Zusammenfallen

Um Ihren Rollator platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen
Nehmen Sie zuerst den Einkaufskorb ab
Klappen Sie den Sitz nach oben und ziehen Sie die Querstrebe nach oben
Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen



Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.
Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)
Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Technische Daten

Rollator LR 53/56

Bereifung	PU-Bereifung
Material	Alurahmen (lackiert) Sitzfläche und Rückenpolsterung PU
Farbe	silber
Sitzhöhe (cm)	53 / 56
Schiebegriffhöhe (cm)	79 – 90
Gesamtbreite (cm)	60
Gesamtlänge (cm)	76
Gesamthöhe (cm)	90
Gewicht (kg)	7,5
Zuladung Einkaufskorb (kg)	3
Max- Belastbarkeit (kg)	120

Wiedereinsatz

Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet.
Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
Der Rollator sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

Wartung

Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren. Prüfen Sie, ob die Schrauben zur Fixierung des Sitzes am Auflagerrohr fest angezogen sind. Falls nicht, ziehen Sie die Schrauben bitte fest. Prüfen Sie, ob alle Steck- und Schnellverschlüsse richtig eingestellt und vollständig eingerastet sind. Prüfen Sie, ob alle Knöpfe der Steck- und Schnellverschlüsse sich einwandfrei lösen und wieder fixieren lassen. Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile wie Bereifung / Bodenzüge / Bremsklötze usw.

Trendmobil GmbH

Frohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9359-0

Telefax: +49 (0) 5254-9359-29

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler:

