

Sicherheitshinweise

- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe.
- Beim Benutzen auf abschüssigen Wegen benutzen Sie die Betriebsbremse.
- Benutzen Sie den Rollator nur auf ebenen horizontalen und festen Untergrund.
- Beim starken Aufstützen auf die Handgriffe kann der Rollator nach hinten kippen.
- Beim Zusammenklappen des Rollators Ligero können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Bitte beachten Sie, dass sich Polsterteile, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, aufheizen und bei Berührung Hautverletzungen verursachen können. Decken Sie daher diese Teile ab oder schützen Sie den Rollator vor Sonneneinstrahlung.

Reinigung

Die Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen (bei Benutzerwechsel zwingend erforderlich) durchführen. Zur Reinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit handelsüblichen Mitteln durchführen. Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel!

Wartung

Der Rollator Ligero ist wartungsfrei. Wenn Sie ein Nachlassen der Bremsen, Schwergängigkeit der Räder oder andere Funktionseinschränkungen feststellen, ist Rollator für eine Instandsetzung dem Fachhandel zu übergeben.

Lieferumfang

- Rollator Ligero
- Einkaufskorb
- Gebrauchsanweisung

Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und bezieht sich auf alle Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Technische Daten

Maximale Zuladung:	120 kg / 3kg Einkaufskorb
Leergewicht:	7 kg
Gesamtbreite:	550 mm
Gesamttiefe:	650 mm
Gesamthöhe:	790 – 900 mm
Abstand zwischen den Handgriffen:	460 mm
Sitzhöhe:	510 / 560 mm
Verstellungen:	Schiebegriff: 790 - 900 mm (5-fach verstellbar)
Bereifung:	Ø 200 x 30 mm, pannensicher

Stand: 10/2007/Rev.2

Gebrauchsanweisung

Rollator Ligero



Allgemeines

Für den hier beschriebenen Rollator ist die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte, erklärt.

Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist beim Benutzer bereitzuhalten und bleibt auch bei Weitergabe des Produktes beim Produkt.

Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber den in dieser Gebrauchsanweisung dargestellten Ausführung behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Übersetzungen und Vervielfältigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Herstellers.

Das Urheberrecht liegt beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den jeweils aktuellen Stand erfahren Sie bei uns.

Indikation und Verwendungszweck

Der Rollator Ligero dient bewegungseingeschränkten Personen mit max. 120 kg Körpergewicht als Gehhilfe und eingeschränkt auch als Sitzgelegenheit zum vorübergehenden Ruhen.

Der unter der Sitzfläche eingehängte Drahtkorb ist zur Ablage und zum Transport von Gegenständen oder Waren vorgesehen.

Der Rollator Ligero darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe oder zum Transportieren schwerer Lasten ist bestimmungswidrig und gefährlich!

Aufstellen / Entfalten des Rollators

- Positionieren Sie den Rollator vor sich in Fahrrichtung
- Betätigen Sie die Feststellbremse
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Drücken Sie mit der anderen Hand den Klappmechanismus nach unten bis er spürbar einrastet
- Klappen Sie den Sitz nach unten
- Klappen Sie die Rückenlehne in Gebrauchslage und hängen Sie den Korb von vorn am Rahmen ein



Falten des Rollators

- Nehmen Sie den Korb vom Rahmen ab
- Positionieren Sie den Rollator in Fahrrichtung vor sich und betätigen Sie die Feststellbremsen
- Klappen Sie den Sitz hoch
- Halten Sie den Rollator mit der einen Hand am Handgriff
- Lösen Sie mit der anderen Hand den Klappmechanismus mit einem ruck aus der Verankerung
- Nun ziehen Sie den Rollator ganz zu sich heran



Schiebegriff einstellen

- Betätigen Sie als Erstes die Feststellbremse
- Lösen Sie die Verschraubung und nehmen Sie die Befestigungsschraube ganz heraus
- Positionieren Sie die Schiebegriffe in der korrekten Höhe (Empfohlen: Schiebegriffe sollten sich in Höhe des Handgelenks befinden)
- Anschließend sind die Befestigungsschrauben wieder einzusetzen und mit der Sternmutter festzuziehen



Achten Sie darauf, dass die Schraube komplett in der Bohrung versinkt. Zum Verstauen des Rollators können Sie die Schiebegriffe auch ganz aus dem Rahmen herausnehmen.

Betriebs- und Feststellbremse

- Die Bremse wird als Betriebsbremse (beim Schieben), durch ziehen des Bremshebels nach oben verwendet
- Durch Drücken des Hebels nach unten wird die Bremse als Feststellbremse (beim Parken) verwendet



Bremseinstellung

- Die Bremswirkung kann direkt am Bremshebel oder am Bowdenzug eingestellt werden
- Die Bremse ist korrekt eingestellt, wenn die Bremshebel wie auch die Bowdenzüge kein Spiel aufweisen und die Räder sich ohne Schleifgeräusche drehen lassen

